

Наборы RapID для экспресс-идентификации микроорганизмов, Oxoid

ДИАМ
современная лаборатория

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Результат за 4 часа. Широкий выбор панелей.
Простая процедура анализа!

Идентификация микроорганизмов занимает много времени в рамках проведения рутинных классических методов. Предлагаем современный ускоренный ручной метод биохимической идентификации микроорганизмов, позволяющий получить результат анализа в течение 4 часов.



Наборы **RapID** – это пластиковый стрип и вспомогательные реактивы. Стрип состоит из лунок, в которые внесены лиофилизированные субстраты для определения специфической ферментативной активности микроорганизма, а также его способности утилизировать углеводы. В лунки вносится суспензия чистой культуры, после чего стрип инкубируют в термостате 2–4 ч. После инкубации на стрипах учитывается результат по изменению цвета суспензии в лунке, путем сравнения со стандартами или посредством использования компьютерной программы. Панели **RapID** подходят как для самостоятельного исследования или как дополнение к автоматическим и полуавтоматическим системам идентификации микроорганизмов.

Широкий выбор панелей **RapID** на различные микроорганизмы, в том числе:

- **RapID ONE** – для идентификации *Enterobacteriaceae*, идентификация более 70 видов
- **RapID Staph Plus** – для идентификации *Staphylococci*, идентификация более 40 видов
- **RapIDANA II** – для идентификации клинически значимых анаэробных бактерий Грам (+) и Грам (-), идентификация более 90 видов
- **RapID Yeast Plus** – для идентификации дрожжей, идентификация более 40 видов

Преимущества панелей **RapID Thermo F.S (Oxoid)**

- **Инкубация – 4 часа!**
- **Одношаговая инокуляция** – меньше ручных манипуляций
- **Характерные цветные реакции** – простая оценка результата
- **Программное обеспечение ERIC** – бесплатно

Информация для заказа:

R8311006 Тест-система биохимической идентификации *Enterobacteriaceae*, за 4 часа, RapID ONE, 20 тестов/набор, Thermo FS (Oxoid)
R8311009 Тест-система биохимической идентификации *Staphylococci*, за 4 часа, RapID STAPH PLUS, 20 тестов/набор, Thermo FS (Oxoid)
R8311002 Тест-система биохимической идентификации анаэробов за 4 часа, RapIDANA II, 20 тестов/набор, Thermo FS (Oxoid)
R8311007 Тест-система для идентификации за 4 часа RapID Yeast Plus, 20 шт/уп, Thermo FS (Oxoid)

Контрольные штаммы микроорганизмов, Oxoid

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Используют для проверки качества питательных сред, диагностических реагентов, оценки бактериологических процедур, поддержания (сохранения) имеющихся в лаборатории культур.


Компания **Thermo F.S (Oxoid)** предлагает два вида контрольных штаммов: **Culti-Loops** в формате одноразовых петель и **Quanti-Cult Plus** во флаконах.

Контрольные штаммы Culti-Loops – одноразовые бактериологические петли с нанесенными по запатентованной технологии стабилизированными микроорганизмами.

- Получены из оригинальных культур коллекции культур ATCC/NCTC (25 лет опыта производства).
- Проверка каждой партии на чистоту, жизнеспособность и биохимические показатели.
- Наличие сертификатов качества



- Индивидуально упакованы (5 петель в упаковке)
- Одной петлей можно засеять до 5 чашек Петри
- Готовые к использованию, не требуется дополнительных инструментов, игл и пинцетов
- Хранение при 2–8°C, при вскрытии одной петли, другие могут храниться до истечения срока годности.
- Срок годности 1 год 6 месяцев.

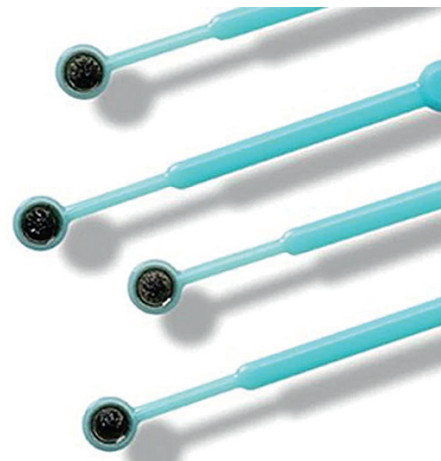

Контрольные штаммы Quanti-Cult – стабилизированные контрольные штаммы микроорганизмов во флаконах.



- Флакон с красной крышкой – культура микроорганизма (микроорганизм - в виде пленки на внутренней поверхности красной крышки)
- Флакон с синей крышкой – растворитель (0,3 мл)
- Один флакон рассчитан на 1 инокуляцию; 1 упаковка содержит 10 тестов
- Обеспечивают >100 КОЕ в 0,3 мл готового инокулята
- Наличие сертификатов качества
- Срок годности 546 дней.



000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

